


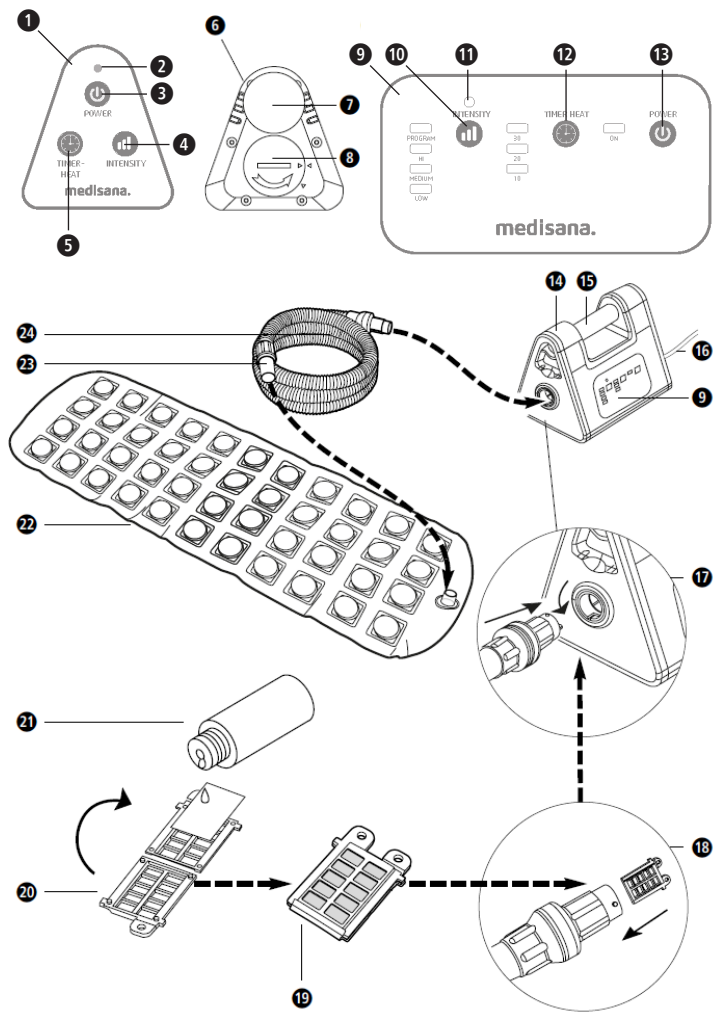

- Dálkový ovladač (přední strana)
- LED kontrolka
- Tlačítko ZAP/VYP intenzity bublinek
- Tlačítko pro nastavení intenzity bublinek
- Dálkový ovladač (zadní strana)
- Tlačítko časovače/vyhřívání
- Příhradka na baterii
- Ovládací panel
- Tlačítko pro nastavení intenzity bublinek
- Infračervený senzor pro dálkový ovladač
- Tlačítko časovače/vyhřívání
- Přístroj
- Napájecí kabel se zástrčkou
- Nástavec pro vložení nástavce pro aromatické přísady (připojení k přístroji)
- Nástavec pro aromatické přísady (zasunutí do hadicové koncovky)
- Nástavec pro aromatické přísady (v uzavřeném stavu s vloženým polštářkem)
- Nástavec pro aromatické přísady (v otevřeném stavu s polštářkem)
- Vonný olej pro aromaterapii (není součástí dodávky)
- Měkká podložka s přísavkami na spodní straně
- Hadicová koncovka bez vedení (připojení k měkké podložce)
- Vzduchová hadice

Vysvětlení značek

DŮLEŽITÉ

Nerespektování tohoto návodu může mít za následek těžká zranění či škody na přístroji.

VAROVÁNÍ

Tato výstražná upozornění je třeba re-spektovat, aby bylo zabráněno případným zraněním uživatele.

POZOR

Tyto pokyny je třeba respektovat, aby bylo zabráněno případnému poškození přístroje.

UPOZORNĚNÍ

Tyto pokyny vám poskytnou užitečné dodatečné informace k instalaci nebo provozu.

IP44

Údaj o stupni krytí, který udává odolnost proti vniknutí cizích těles a vody



Přístroj používejte pouze v uzavřených prostorech!



Nepoužívejte přístroj nad jakýmkoliv nádobami naplněnými vodou!



LOT Číslo šarže



Výrobce

CZ Bezpečnostní pokyny



Před použitím přístroje si pečlivě přečtete návod k použití, zejména bezpečnostní pokyny, a uschovejte si ho pro pozdější potřebu. Pokud přístroj předáváte třetím osobám, přiložte k němu v každém případě i tento návod k použití.



k napájení proudem

- Před připojením přístroje ke zdroji elektrického proudu se ujistěte, že je vypnutý a že elektrické napětí uvedené na typovém štítku souhlasí s napětím ve vaší zásuvce.
- Přístroj zapojte do dobře přístupné zásuvky.
- Přístroj by měl být připojen přes proudový chránič (RCD) se jmenovitým chybovým proudem do 30 mA.
- Zajistěte, aby základní přístroj nemohl spadnout do vany a aby na něj nebylo mož-né z vany dosáhnout.
- Napájecí kabel a přístroj chraňte před teplem, horkými povrchy, vlhkostí a kapalinami. Na síťovou zástrčku nikdy nesahejte mokřýma rukama nebo pokud stojíte ve vodě.
- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu přístroje, musí být kabel vyměněn výrobcem, jeho servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo ohrožení.
- Součástí přístroje, které vedou elektrické napětí, je nutné zajistit tak, aby nemohly spadnout do vany a aby na ně osoby z vany nemohly dosáhnout.
- Nesahejte na přístroj, který spadl do vody.
- Okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Po každém použití ihned vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Při odpojování přístroje od elektrické sítě nikdy netahejte za napájecí kabel.

pro určité osoby

- Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je připojen k elektrické síti.
- Nepoužívejte tento přístroj na podporu nebo jako náhradu lékařských aplikací. Chro-nické bolesti a příznaky by se mohly ještě více zhoršit.
- Přístroj nepoužívejte, pokud máte citlivou kůži nebo pokud máte potíže se srdcem či krevním oběhem, trpíte zánětem žil, trombózou nebo vysokým krevním tlakem.
- Pro těhotné platí osobní limity zátěže.
- Pokud máte bolesti neznámého původu, nepoužívejte přístroj, dokud se neporadíte s lékařem.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smy-slovými či mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí nebezpečím s ním spojeným.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.

pro provoz přístroje

- Přístroj používejte pouze v souladu s jeho určením podle návodu k použití. Při použití k nevhodnému účelu zanikají nároky na záruku!
- Před každým použitím pečlivě zkontrolujte přístroj, měkkou podložku a napájecí kabel a ujistěte se, že nevykazují známky poškození. Vadný přístroj se nesmí uvádět do provozu. Abyste se vyhnuli možným rizikům, pošlete přístroj k opravě do servisního střediska.
- Přístroj nepoužívejte, pokud nefunguje bezvadně, pokud spadl na zem či do vody, nebo pokud došlo k poškození přístroje, kabelu nebo zástrčky.
- Před montáží/demontáží součástí přístroje se vždy ujistěte, že je odpojen napájecí kabel.
- Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
- Do otvorů na přístroji nebo do vzduchové hadice nestrkejte žádné cizí předměty.
- Perličkovou lázeň používejte pouze v uzavřených prostorách!
- Nepoužívejte přístroj nad jakýmkoliv nádobami naplněnými vodou!

Bezpečnostní pokyny týkající se baterií

- Baterie nerozebírejte!
- Vybité baterie ihned vyjměte z přístroje!
- Zvýšené nebezpečí vytečení! Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a slizni-cemi! Při kontaktu s akumulátorovou kyselinou okamžitě opláchněte zasažené místo dostatečným množstvím čisté vody a ihned vyhledejte lékaře!
- Pokud došlo ke spojení baterie, je třeba okamžitě vyhledat lékaře!
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu!
- Vyjměte baterie z přístroje, pokud ho delší dobu nepoužíváte!
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí!
- Baterie nedobíjejte! Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Baterie nezkratujte! Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Baterie nevhazujte do ohně! Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Použité baterie a akumulátory nevyhazujte do domovního odpadu, ale do zvlášť-ního odpadu nebo do sběrného boxu na baterie ve specializovaném obchodě!

- Přístroj musí být umístěn tak, aby na něj nedosáhla osoba, která se nachází ve vaně.
- Přístroj nedoporučujeme používat déle než 30 minut. Delší použití může vést k přehřátí přístroje.
- Přístroj nikdy nepokládejte a nepoužívejte přímo vedle elektrických kamen či jiných tepelných zdrojů.
- Zabraňte kontaktu přístroje, zejména pak měkké podložky, se špičatými nebo ost-rými předměty a nepichujte do něj žádné jehly.
- Přístroj nepoužívejte, pokud jsou ucpané otvory.
- Na přístroj nestoupejte.
- Přístroj nepoužívejte, pokud pociťujete únavu. Při používání přístroje nesmíte usnout.

pro údržbu a čištění

- Přístroj smíte sami pouze čistit.
- V případě poruchy přístroj neopravujte sami. V opačném případě zaniká jakýkoliv nárok na záruku, a navíc mohou hrozit vážná nebezpečí (požár, úraz elektrickým proudem, jiná poranění). Opravy nechte pro-vádět pouze v autorizovaných servisech.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Před čištěním přístroj vypněte a vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Přístroj nikdy neponořujte do vody nebo jiných kapalin.
- Věnujte pozornost kapitole „Čištění a údržba“.
- Přístroj nenoste, nevytahujte ani neotáčejte uchopením za napájecí kabel a zabraňte skřípnutí kabelu.
- Před uložením nechejte přístroj vychladnout a měkkou podložku včetně příslušenství uschnout. Uchovávejte perličkovou lázeň do příštího použití na čistém a suchém místě, nejlépe v originálním obalu.

Použití v souladu s určením

Perličková lázeň vytváří ve vaně vzduchové bublinky, které mají na uživatele relaxační účinek. Přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti, nikoliv pro komerční účely nebo pro použití v lékařském prostředí! Pokud budete mít obavy ze zdravotního hlediska, poraďte se před použitím perličkové lázně s lékařem!



VAROVÁNÍ

Dbejte na to, aby se balicí fólie nedostaly do rukou dětem! Hrozí nebezpečí udušení!

Rozsah dodávky

Nejprve zkontrolujte, zda je přístroj kompletní a zda nevykazuje známky poškození. V případě po-chybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce nebo servisní středisko.

V rozsahu dodávky je:

- 1 přístroj s napájecím kabelem
- 1 vzduchová hadice
- 1 měkká podložka
- 1 dálkový ovladač vč. baterie typu CR2032
- 3 nástavce pro aromatické přísady s polštářkem
- 1 návod k použití

Ovládání

Uvedení do provozu

- Zajistěte v koupelně příjemnou teplotu vzduchu.
- Postavte přístroj ❶ do vzdálenosti nejméně 60 cm od vany tak, aby na něj nebylo možné z vany dosáhnout. Dbejte na to, aby přívod vzduchu na spodní straně nebyl zakrytý. Podlaha musí být suchá a rovná.
- Položte měkkou podložku ❷ do vany a dobře ji přitlačte ke dnu. Přísavky na spodní straně měkké podložky budou držet lépe, když podložku navlhčíte ruční sprchou. Vzduchová přípojka se nachází na konci podložky (u nohou).
- Měkká podložka ❷ musí být pevně přichycena ke dnu vany, aby se zabránilo jejímu pohybu.
- Připojte hladkou koncovku hadice ❸ k měkké podložce ❷.
- Napustěte vodu. Dbejte na to, aby voda byla příjemně teplá, nikoliv horká.
- Nepoužívejte pěnící přísady do koupele.



POZOR

Po použití vyjměte měkkou podložku z vany. To uděláte nejlépe tak, že nehty opatrně zajedete pod přísavky, aby se uvolnilo vakuum. Vytáhněte podložku po straně vany ven. Dbejte na to, aby nedošlo k jejímu roztřízení.

Aromaterapie

- Přístroj lze používat s vloženým nástavcem pro aromatické přísady nebo bez něj.
- Pokud chcete perličkovou lázeň používat v kombinaci s aromaterapií, kápněte nyní jednu kapku aromatického oleje ❶ na polštářek, vložte polštářek do nástavce pro aromatické přísady ❷ a zavřete nástavec. Nedávejte na polštářek příliš velké množství aromatického oleje. Mohlo by tím dojít k poškození povrchu nástavce pro aromatické přísady.
- Uzavřený nástavec pro aromatické přísady ❸ zasuňte do příslušné hadicové koncovky ❹.
- Koncovku hadice s vloženým nástavcem pro aromatické přísady zapojte do přípojky na přístroji ❶.
- Zapojte zástrčku napájecího kabelu ❶ do zásuvky.

Obsluha přístroje

Perličkovou lázeň můžete ovládat buď přímo na ovládacím panelu na přístroji ❶, nebo pomocí dálkového ovladače ❶. Tlačítka na dálkovém ovladači ❶❷❸ odpovídají tlačítkům na ovládacím panelu přístroje ❶❷❸. Každá aktivovaná funkce je na ovládacím panelu indikována LED kontrolkou vlevo od příslušného tlačítka. Při použití dálkového ovladače svítí LED kontrolka ❷ na dálkovém ovladači.

Zapnutí/vypnutí přístroje

Přístroj se zapíná/vypíná pomocí tlačítka ZAP/VYP ❶ nebo ❸. Po zapnutí začne přístroj okamžitě pracovat na nejnižší úrovni výkonu (Low, žlutá LED kontrolka). LED kontrolka ON svítí červeně. Standardní doba aplikace je 30 minut (zelená LED kontrolka).

Nastavení intenzity bublinek

Pomocí tlačítka pro nastavení intenzity bublinek ❹ nebo ❷❸ můžete regulovat intenzitu. Opakovaným stisknutím tlačítka můžete změnit nastavení intenzity z Low (nízká) přes Medium (střední) a High (vysoká) až po Program (automatické přepínání 3 nastavení Low/Medium/High).

Nastavení doby aplikace

Pomocí tlačítka časovače/vyhřívání ❺ nebo ❹❸ můžete regulovat dobu aplikace. Opakovaným krátkým stisknutím tlačítka můžete přepínat mezi hodnotami 30/20/10 minut. Po uplynutí nastavené doby se přístroj automaticky vypne. Přístroj NEDOPORUČUJEME používat déle než 30 minut. Opětovnému zapnutí přístroje by měla předcházet přestávka v délce nejméně 30 minut.

Funkce vyhřívání

Pomocí tlačítka časovače/vyhřívání ❺ nebo ❹❸ můžete dodatečně zapnout/vypnout funkci vyhřívání. Podržením tlačítka (po dobu min. 2 sekund) se změní LED kontrolka ON: LED kontrolka ON svítí červeně: funkce vyhřívání je aktivní. LED kontrolka ON svítí modře: funkce vyhřívání je neaktivní.



UPOZORNĚNÍ

• Funkce vyhřívání neslouží k udržení teploty vody ani k ohřevu studené vody ve vaně. Ohříváním vzduchu, ze kterého vznikají bublinky v perličkové lázni, je zabráněno příliš rychlému ochlazení vody během provozu.

• Neponořujte dálkový ovladač do vody!

• Dálkový ovladač je na zadní straně opatřen přísavkou ❹. Pokud ji lehce navlhčíte, můžete dálkový ovladač upevnit do pohodlné vzdálenosti na stěnu v koupelně nebo na okraj vany.

• Dálkový ovladač funguje pouze tehdy, když ho namíříte na infračervený senzor ❶ na ovládacím panelu přístroje.

Výměna baterií

Když je baterie příliš slabá, nesvítí při použití dálkového ovladače LED kontrolka ❶. Dálkový ovladač je napájen jednou 3V lithiovou baterií CR2032. Ta je uložena v příhradce na baterii ❶ na zadní straně. Chcete-li baterii vyměnit, otevřete kryt příhradky pomocí vhodné mince. Vyjměte vybitou baterii a nahraďte ji novou 3V lithiovou baterií CR2032. Ujistěte se, že jste baterii vložili správně, tzn. kladným pólem (+) nahoru. Příhradku na baterii ❶ opět uzavřete pomocí mince.

Čištění a údržba

Před čištěním přístroje vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky!

- Přístroj a dálkový ovladač nevyzažují údržbu. Čas od času je očistěte navlhčeným měkkým hadříkem.
- Měkkou podložku po každém použití očistěte ruční sprchou nebo houbou. Je-li to nutné, použijte jemný čisticí prostředek pro domácnost nebo mýdlovou vodu.
- Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo tvrdé kartáče.
- Zbytkovou vodu odstraňte nejlépe tím, že podložku otočíte, naplocho ji položíte do vany a krátce přístroj zapnete. Zbytková voda bude vytlačena vzduchem vycházejícím ven.
- Podložku pravidelně dezinfikujte, abyste ji zbavili bakterií. Při každodenním používání doporučujeme dezinfekci provádět jednou týdně, zejména tehdy, pokud perličkovou lázeň používá více osob. Používejte běžné dezinfekční prostředky pro domácnost a respektujte pokyny výrobce.
- Kabel je třeba rozplést, pokud je zkroutčený.
- Přístroj uchovávejte nejlépe v původním obalu, ve kterém byl zakoupen, na čistém a suchém místě.

Likvidace



Tento přístroj se nesmí likvidovat společně s běžným domovním odpadem. Každý spotřebitel je povinen odevzdat veškeré elektrické nebo elektronické přístroje – bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky, či nikoliv – do sběrného místa ve svém bydlišti nebo v obchodě, aby mohly být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. Před likvidací přístroje vyjměte baterii. Použité baterie nevyhazujte do domovního odpadu, ale do zvláštního odpadu nebo do sběrného boxu na baterie ve specializovaném obchodě. Pro informace týkající se likvidace se obraťte na místní orgán nebo na prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili.

Technické údaje

Název a model:	perličková lázeň medisana BBS	
Napájení:	220–240 V~ 50 Hz	Náhradní díly:
Dálkový ovladač:	3V lithiová baterie CR2032	<i>Č. výrobku / označení</i>
Příkon:	cca 570 W	88383 měkká podložka (cca 36 × 120 cm)
Provozní doba:	max. 30 minut	88384 dálkový ovladač vč. baterie
Provozní přestávka:	min. 30 minut	30666 vzduchová hadice (cca 2,4 m)
Automatické vypnutí:	po cca 30 minutách	30669 nástavce pro aromatické přísady se 3 polštářky
Délka napájecího kabelu:	cca 2,2 m	
Číslo výrobku:	88388 / 88389	
Číslo EAN:	40 15588 88388 0 / 40 15588 88389 7	

V rámci neustálého zlepšování výrobku si vyhrazujeme právo provádět na něm technické a tvarové změny.

Aktuální verzi tohoto návodu k použití najdete na adrese www.medisana.com

Záruční a servisní podmínky

V záručním případě se obraťte na svůj specializovaný obchod nebo přímo na servisní středisko. Bude-li nutné přístroj zaslat zpět, uveďte, o jaký druh závady se jedná, a přiložte kopii účtenky.

Při tom platí následující záruční podmínky:

- Na výrobky **medisana** je poskytována 3letá záruka od data prodeje. Datum prodeje je v záručním případě nutno doložit účtenkou nebo fakturou.
- Závady v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad budou v záruční době odstraněny bezplatně.
- Záručním plněním nedochází u přístroje ani vyměněných dílů k prodloužení záruční doby.
- Záruka se nevztahuje na:
 - všechny škody, které vznikly v důsledku nevhodného zacházení s výrobkem, např. z důvodu nerespektování návodu k použití;
 - škody, které byly zapříčiněny údržbou nebo manipulací ze strany kupujícího nebo nepovolaných třetích osob;
 - škody, které vznikly během přepravy od výrobce ke spotřebiteli nebo při zpětném zaslaní do servisního střediska;
 - díly příslušenství, které podléhají běžnému opotřebení.
- Odpovědnost za přímé nebo nepřímé následné škody způsobené přístrojem je vyloučena i v případě, že dané poškození přístroje bylo uznáno jako záruční případ.